

ご使用のしおり

このたびは、弊社の『シートベルト』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・本書は必ず保管しておいてください。
- ・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡してください。
- ・お買い上げの『シートベルト』は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

ウチエ株式会社

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29

TEL(06)6482-0230 FAX(06)6401-6372

関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台 4-12-3

TEL(047)362-0311 FAX(047)362-0312


福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北 4-6-5

TEL(092)323-4331 FAX(092)323-4332


兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井 732-1

各部名称

材質 ・バックル(プラグ、ソケット)、アジャスター/ポリアセタール ・ベルト/ナイロン

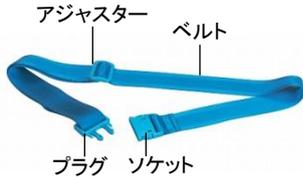


※バックル(プラグ+ソケット)

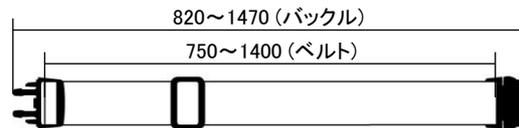

使用方法


●着用の仕方

車体の後ろからベルトを通し、プラグをソケットにしっかり差し込んでください。ベルトを左右に引っ張り、抜けなければ着用完了です。

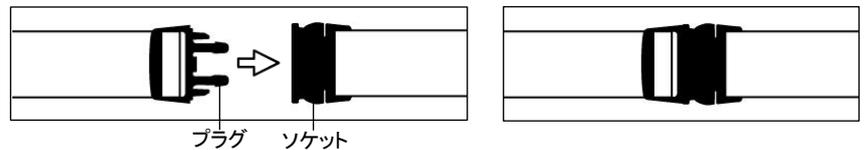


●取り外し方

ソケット両側のボタンを押しながら、プラグを抜いてください。

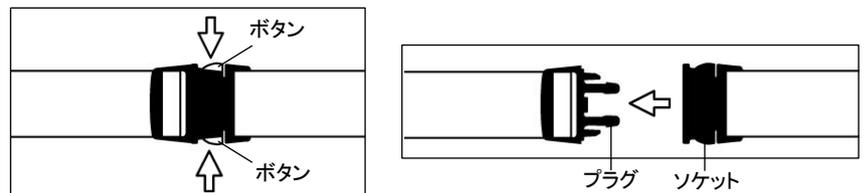

●ベルト長さ調整の仕方

アジャスターを左右にスライドし、プラグを引いてベルトを張り、長さを調整してください。

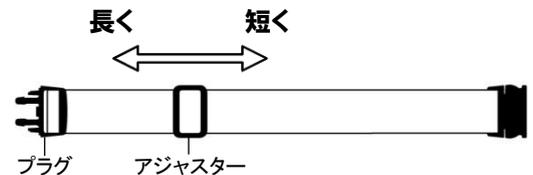

⚠注意

- ※プラグをソケットにしっかり差し込み、ベルトを左右に引っ張っても抜けない事を確認してください。
- ※ソケットに異物などが入らないように注意してください。異物が入るとプラグがソケットに完全に入らず、不意にはずれてけがをするおそれがあります。
- ※ご使用前に、キズ、ひび、変形、摩耗等の異常がないか確認してください。これらの異常が発生している場合はすぐに使用を中止し、交換してください。
- ※シートベルトは1人用です。2人以上で使用しないでください。
- ※シートベルトの改造や分解はしないでください。
- ※過度な衝撃の加わる使用はしないでください。
- ※バックルやアジャスターでお肌を傷つけないよう、十分に注意してください。
- ※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。本体が劣化し、破損、けがの原因となります。
- ※熱湯をかけないでください。劣化、破損するおそれがあります。
- ※アイロン、乾燥機の使用はお止めください。
- ※直射日光に当てないでください。破損や退色するおそれがあります。
- ※変形、変色の原因となりますので、次のところに放置しないでください。
 - ・戸外、直射日光のあたる場所
 - ・冷暖房機の冷気や熱気が直接当たる場所
 - ・ストーブなどの火気の近く
 - ・高温多湿、低温な場所
 - ・風通しの悪い場所