



ウチエの快適オプション品

前倒れ防止バー

品番：7050

対応機種

- ・くるくるチェアD
- ・くるくるベンチD
- ・シャトレチェア12輪
- ・シャワーラク4輪自在
- ・シャワーラク



ご使用のしおり

このたびは、弊社の『前倒れ防止バー』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・本書は必ず保管しておいてください。
- ・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡してください。
- ・お買い上げの『前倒れ防止バー』は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

各部名称

前倒れ防止バー

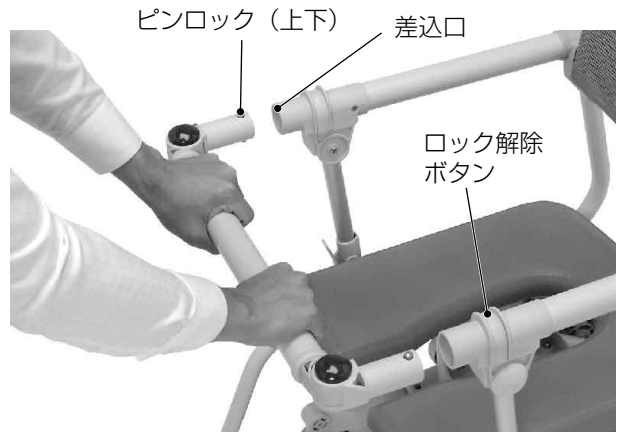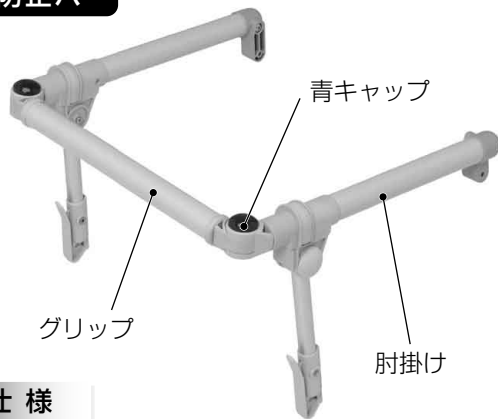

仕様

材 質	グリップ、肘掛け／アルミ、PVC、PA
重 量	約1.5kg（肘付き）、約0.5kg（グリップ）
グリップ	φ3.4cm
グリップ握り幅	34cm

⚠注意 ※ロック解除ボタンをめくるなどして、取り外さないでください。

お手入れ方法

- ・ご使用後は、石けんやシャンプー、入浴剤などを洗い流してください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を絞って拭き、その後やわらかい布で乾拭きしてください。
- ・ご使用後は、日陰の通気性の良い場所で乾かしてください。濡れたまま放置されますと、カビの原因となります。


⚠注意

- ※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。本体が劣化し、破損、けがの原因となります。
- ※直射日光に当てないでください。樹脂部品が劣化し、破損、けがの原因となります。また、退色するおそれがあります。
- ※熱湯をかけないでください。樹脂部品が劣化し、破損、けがの原因となります。

肘掛け交換方法

対応機種は、肘掛けごと交換することで、前倒れ防止バーを後付けできます。

1. 肘掛け取付ネジ内側のキャップを、マイナスドライバーなどで外してください。（写真①）
2. M6 ナット用スパナやレンチ（呼び10）2本を使用して肘掛け取付ネジを外し、肘掛けを取り外してください。（写真②）
3. 前倒れ防止バー取付用肘掛けのネジ穴にワッシャー小を通した付属のネジを通し、ワッシャー大、座を付けてください。
4. 車体の肘掛け取付穴にネジを通し、座、ワッシャー大、スプリングワッシャーを付けて、ナイロンナットを締めてください。（写真③）肘掛けをはね上げて落ちないぐらいに、ナットの締め調節をしてください。反対側も同じように取り付けてください。
5. ナイロンナットにキャップを取付けてください。

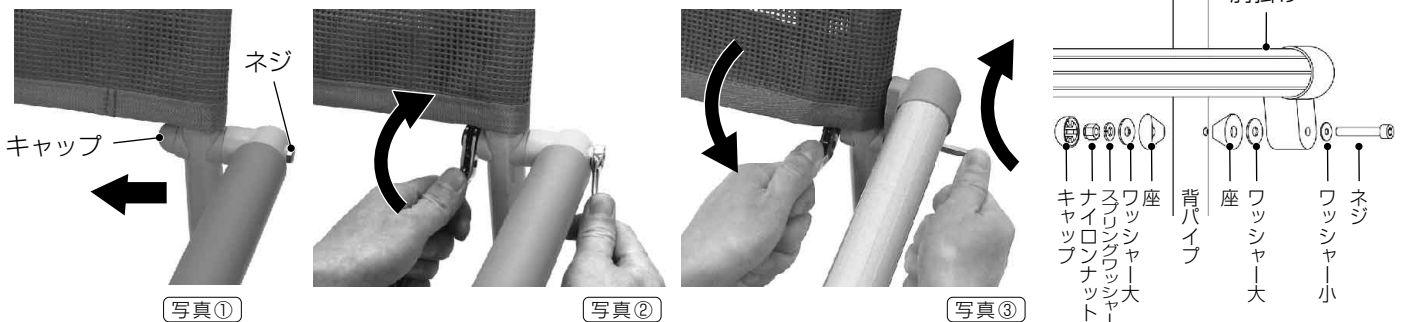

⚠注意

- ※ネジがゆるんでいないか、確認してください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。

開き方

1. ロック解除ボタンを上から押しながら片側のグリップをまっすぐ抜き(写真①)、最後まで前に開いてください。(写真②)
2. 開いたグリップを内側に90°回転させ(青キャップが内側。写真③)、下に折りたたんでください。(写真④)



⚠ 注意

- ※グリップを閉じた状態で、無理にグリップを引き抜かないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※開いたグリップを引っ張らないでください。不意に抜けて、破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※開いたグリップをつかんで荷重を掛けたり、手すりかわりに使用しないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※グリップを開く際や下に折りたたむ際は、グリップがご利用者の足などに当たらないように注意してください。
- ※グリップを下に折りたたんだ状態で、車いすを押さないでください。グリップが前輪に当たり、破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※指詰めにご注意ください。

閉じ方

1. 下に折りたたんだグリップを上げてください。(写真①)
2. 上げたグリップを、外側に90°回転させ(青キャップが上側、写真②)、グリップをご利用者側に引き寄せてください。
3. 上下のプッシュボタンを押しながら(写真③)、カチッと音がするまで差込口に差し込んでください。(写真④)

写真①



写真②



プッシュボタン

写真③

写真④






⚠ 注意

- ※閉じたグリップは、ロックがかかり、抜けない事を確認してください。転倒、けがをするおそれがあります。
- ※グリップを開く際や下に折りたたむ際は、グリップがご利用者の足などに当たらないように注意してください。
- ※指詰めにご注意ください。

取り外し方

1. ロック解除ボタンを上から押しながら、グリップを抜けない程度に、片側ずつ左右ともまっすぐ引いてください。(写真①②)
2. グリップをまっすぐ抜いてください。(写真③)
3. グリップを取り外した状態で使用する場合は、肘掛けの差込口にかならずキャップをはめてから、使用してください。(写真④)

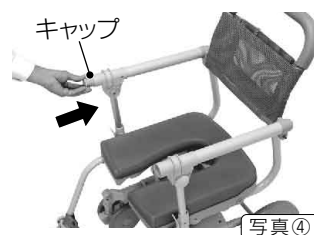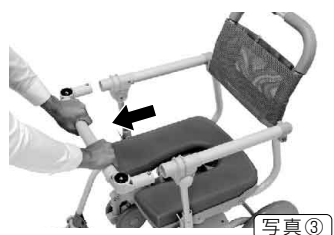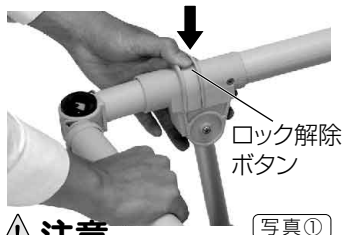

⚠ 注意

- ※無理にグリップを引き抜かないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※グリップは水平でない(青キャップが上)、ロック解除ボタンを押してもロックが解除しません。かならずグリップを水平にして、操作してください。
- ※グリップを取り外した状態で使用する場合は、かならずキャップをはめてください。
- ※指詰めにご注意ください。

取り付け方

- ※差込口にキャップをしている場合は、マイナスドライバーなどを使用し、キャップを取ってください。(写真①)
- ・グリップ先端にある上下のプッシュボタンを押しながら(写真②)、グリップをまっすぐカチッと音がするまで、片側ずつ左右とも差し込んでください。(写真③)

⚠ 注意

- ※差し込んだグリップは、ロックがしっかりとかかり、抜けない事を確認してください。転倒、けがをするおそれがあります。
- ※グリップは水平でない(青キャップが上)、ロックがされません。かならずグリップを水平にして、操作してください。
- ※無理にグリップを引き抜かないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※指詰めにご注意ください。

