

品番：7067

このたびは、弊社の「布製ペーパーホルダー15」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- ・ご使用になる前には、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
  - ・本書は必ず保管しておいてください。
  - ・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。
- ※芯なしペーパーは使用できません。



仕様	
材質	カバー:(表)ナイロン (裏)PVCコーティング 芯棒:ABS
重量	80g

組立て方

- 1.使用する肘掛けにカバーを巻きつけ、ゴムバンドの間にカバーの先端を通して引いてください。(写真①②)
- 2.カバーに芯棒を取り付けてください。(写真③)
- 3.芯棒にトイレトペーパーを取り付けて使用してください。(写真④)

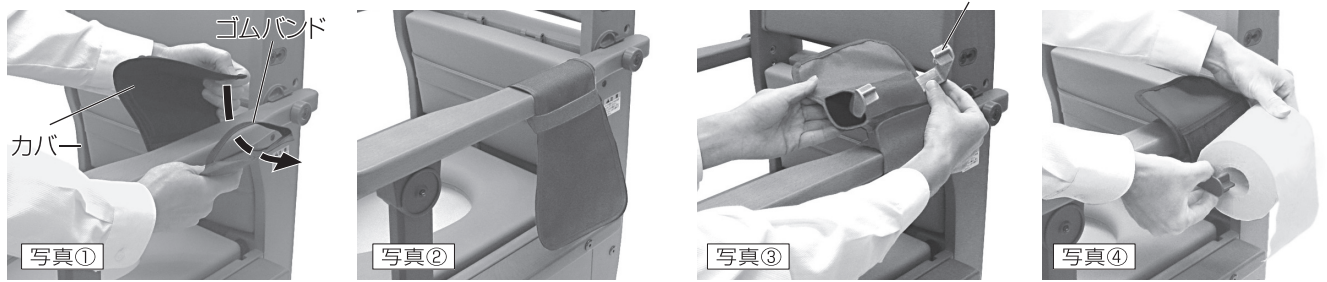

注意

※芯棒にトイレトペーパーを差し込む際は、芯棒を広げ過ぎないでください。破損するおそれがあります。

お手入れの仕方

・汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を絞って拭き、その後残った洗剤分を拭き取ってください。

注意

- ※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。本体が劣化し、破損、けがの原因となります。
- ※熱湯をかけないでください。本体が劣化し、破損、けがをするおそれがあります。
- ※アイロン、乾燥機の使用はおやめください。
- ※直射日光に当てないでください。樹脂部品が劣化し、破損、けがの原因となります。また、退色するおそれがあります。

安全上の注意事項

- ※ペーパーホルダーに過度な荷重をかけないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
- ※ペーパーホルダーを持ってポータブルトイレを移動しないでください。破損するおそれがあります。
- ※本製品を本来の目的以外で使用したり、お客様ご自身での改造や分解は、絶対にお止めください。
- ※芯のないトイレトペーパーには使用できません。
- ※破損、変形、変色の原因となりますので、次のところに放置しないでください。
  - ・戸外や直射日光のあたる場所
  - ・冷暖房器の冷気や熱気が直接当たる場所
  - ・ストーブなど火気の近く
  - ・風通しの悪い場所

ウチエ株式会社

本社／大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL(06)6482-0230 FAX(06)6401-6372  
 関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL(047)362-0311 FAX(047)362-0312  
 福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL(092)323-4331 FAX(092)323-4332  
 兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1

●常に皆様のご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。