

ウチエの快適オプション品

ジェル背パッド

ご使用のしおり

このたびは、弊社の『ジェル背パッド』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


・本書は必ず保管しておいてください。

・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡してください。

・お買い上げの『ジェル背パッド』は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

品番：7082

■各部名称

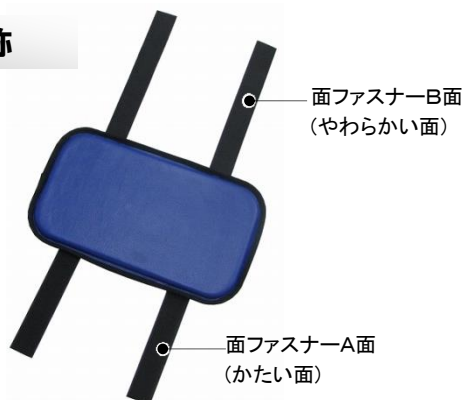

| | |
|----|---|
| 材質 | ・表材/塩化ビニル(表面 PU コーティング)、フチ/ナイロン ・中材/合成ゴム ・面ファスナー/ナイロン |
| 寸法 | ・幅 300x 奥行 175x 厚さ 10mm ・面ファスナー:幅 30x長さ 140(A 面)、幅 30x長さ 200mm(B面) |
| 重量 | 480g |

※面ファスナーは、お好みの長さにカットして使用いただけます。
※50mm以上は貼り合わせて使用してください。

■取付方法

- 1.面ファスナーを外し、B面(やわらかい面)を上にして本体をシャワーキャリーの背もたれに当ててください。
- 2.面ファスナーのA面とB面を合わせて押さえ、しっかり固定してください。

※面ファスナーがしっかり固定されているか確認してください。



■お手入れの方法

- ・使用後は、石けんやシャンプー、入浴剤などを洗い流してください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジや布で拭き、その後やわらかい布などで乾拭きしてください。
- ・使用後は、日陰の通気性の良い場所で平らな状態で乾かしてください。濡れたまま放置されますと、劣化、カビの原因となります。
- ・面ファスナーに糸くずや汚れなどがついた場合は、取り除いてください。

⚠ 注意

※使用後はかならず乾かしてください。濡れたまま放置すると劣化、カビの原因となります。

※お手入れをされていても、カビが発生する場合があります。

※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。劣化、破損の原因となります。

※直射日光に当てないでください。劣化、破損の原因となります。また、退色するおそれがあります。

※熱湯をかけないでください。劣化、破損の原因となります。

※洗濯機、アイロン、乾燥機の使用はおやめください。

■安全上の注意事項

※本製品を浴槽に沈めての使用はしないでください。

※面ファスナーでお肌を傷つけないよう注意してください。

※変形、変色の原因となりますので、次のところに放置しないでください。

- ・戸外 ・雨に濡れるような場所 ・直射日光のあたる場所 ・冷暖房器の冷気や熱気が直接当たる場所
- ・潮風の当たる場所 ・ストーブなど火気の近く ・高温多湿、低温な場所 ・風通しの悪い場所

※本製品を本来の目的以外で使用されたり、お客様ご自身での改造や分解はお止めください。

※石鹸やシャンプーを使用した際は、必ず洗い流してください。滑って転倒、けがをするおそれがあります。

※面ファスナーがしっかり固定されているか確認し、使用してください。

※面ファスナーの接着力が弱まった場合は本体ごと交換してください。

※表面を傷つけたり、折り曲げて使用しないでください。

※保管する際は立てかけず平らにしてください。

※食べないでください。

※各市区町村条例で定められた分別に従って廃棄してください。

ウチエ株式会社 サービス係

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL(06)6482-0230 FAX(06)6401-6372

関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL(047)362-0311 FAX(047)362-0312

福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL(092)323-4331 FAX(092)323-4332

兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1

●常に皆様のご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。