

ウチエの快適オプション品


やわらか背パッド ご使用のしおり

このたびは、弊社の『やわらか背パッド』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・本書は必ず保管しておいてください。
- ・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。
- ・お買い上げの『やわらか背パッド』は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

品番:7089

■各部名称

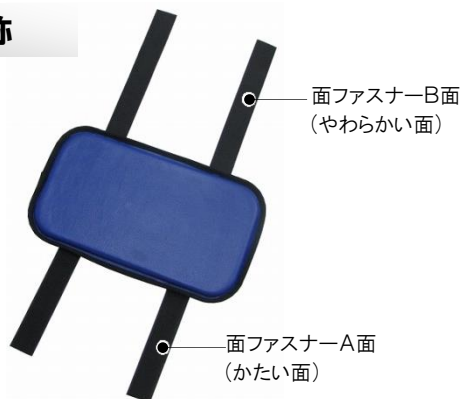

材質	・表材/テロン ・中材/EVA	・フチ/PE ・面ファスナー/ナイロン
寸法	・パッド 幅 290×奥行 175×厚さ 15mm ・面ファスナーA面 幅 25×長さ 140mm ・面ファスナーB面 幅 25×長さ 200mm	
重量	50g	

※面ファスナーは、お好みの長さにカットして使用いただけます。
※50mm以上は貼り合わせて使用してください。

■取付方法

- 1.面ファスナーを外し、B面(やわらかい面)を上にして本体をシャワーキャリーの背もたれに当ててください。
- 2.面ファスナーのA面とB面を合わせて押さえ、しっかり固定してください。

※面ファスナーがしっかり固定されているか確認してください。



■お手入れの方法

- ・使用後は、石けんやシャンプー、入浴剤などを洗い流してください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジや布で拭き、その後やわらかい布などで乾拭きしてください。
- ・使用後は、日陰の通気性の良い場所で平らな状態で乾かしてください。濡れたまま放置されますと、劣化、カビの原因となります。
- ・面ファスナーに糸くずや汚れなどがついた場合は、取り除いてください。

注 ※使用後はかならず乾かしてください。濡れたまま放置すると劣化、カビの原因となります。

注意 ※お手入れをされていても、カビが発生する場合があります。

※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。劣化、破損の原因となります。

※直射日光に当てないでください。劣化、破損の原因となります。また、退色するおそれがあります。

※熱湯をかけないでください。劣化、破損の原因となります。

※洗濯機、アイロン、乾燥機の使用はおやめください。

■安全上の注意事項

※本製品を浴槽に沈めての使用はしないでください。

※面ファスナー(A面や端など)でお肌を傷つけないよう注意してください。

※変形、変色の原因となりますので、次のところに放置しないでください。

- ・戸外 ・雨に濡れるような場所 ・直射日光のあたる場所 ・冷暖房器の冷気や熱気が直接当たる場所
- ・潮風の当たる場所 ・ストーブなど火気の近く ・高温多湿、低温な場所 ・風通しの悪い場所

※本製品を本来の目的以外で使用されたり、お客様ご自身での改造や分解はお止めください。

※石鹸やシャンプーを使用した際は、必ず洗い流してください。滑って転倒、けがをされるおそれがあります。

※面ファスナーがしっかり固定されているか確認し、使用してください。

※面ファスナーの接着力が弱まった場合は本体ごと交換してください。

※表面を傷ついたり、折り曲げて使用しないでください。

※各市区町村条例で定められた分別に従って廃棄してください。

ウチエ株式会社 サービス係

本社/大阪営業所	〒660-0805	兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29	TEL(06)6482-0230	FAX(06)6401-6372
関東営業所	〒271-0087	千葉県松戸市三矢小台 4-12-3	TEL(047)362-0311	FAX(047)362-0312
福岡営業所	〒819-1107	福岡県糸島市波多江駅北 4-6-5	TEL(092)323-4331	FAX(092)323-4332
兵庫工場	〒673-1334	兵庫県加東市吉井 732-1		

●常に皆様のご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。