

ワンタッチ昇降!カンタン肘高調節!最高座面高52cmのポータブルトイレ

タスカルC

新製品

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

介護保険(購入) 組立不要 特許申請中

- 座面の高さ調節 無段階(38~52cm)
- 肘掛け 高さ4段階調節(0/12.5/20/24.5cm)
- その他 二重バケツ・尿ハネガード
ソフト便座・移動用車輪

工具なしですべての調節が可能!

座面高 足で踏むだけ!ワンタッチで高さ調節ができます!



座面の高さはワンタッチで無段階(38~52 cm)の調節が可能です。
高さ調節バーを踏んで本体をお好みの高さまで上げてから足を離して調節します。
下げる時はバーを踏んで上から押し下げます。
※人を乗せたまま高さ調節はできません。



ホット便座
品番:8121



品番:8120

¥62,800 (税抜)


ホット便座
¥74,800 (税抜)

肘掛高 工具なしでかんたんに肘掛けの高さを変えられます!



2箇所のノブネジで高さを調節するだけ!

水平時の肘掛けの高さ(肘から便座)は、0/12.5/20/24.5cmの4段階調節になります。
※肘掛けの角度を変えることによってそれ以上に高さも変わります。

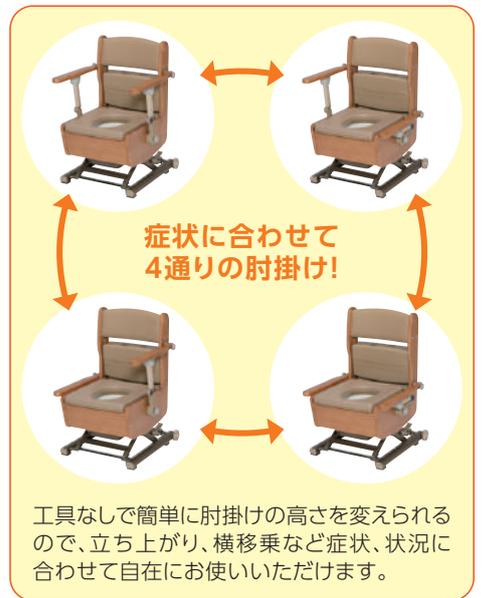

工具なしで簡単に肘掛けの高さを変えられるので、立ち上がり、横移乗など症状、状況に合わせて自在にお使いいただけます。

ラクに立ち上がり



肘掛けの前を低く、後ろを高く調節すると、立ち上がりの際に肘掛けを下に押す力を掛け易く、立ち上がりしやすくなります。足引きスペースもあります。背の高い方は前を高く調節した方が、立ち上がりしやすくなります。体格に応じて調整してください。

足引きスペース

移動に便利な車輪付き

本体を傾けて車輪を地面に接地させて移動します。



移動用車輪付きなので、お掃除などの際のちょっとした移動が楽です。また脚ゴム付きなので滑りにくく安全です。※人を乗せたままでの移動はできません。



車輪と脚ゴム

安心の二重バケツ



バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。

かる〜く上がるお座りパッド



軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることはありません。




お座りパッドは取り外しできますので陰干しすることができます。

中まで洗えるやわらか便座



やわらかな便座なので、長時間座る方にも最適です。また取り外して洗えるので清潔にご利用いただけます。ホット便座もやわらかな素材です。

尿ハネガード付き

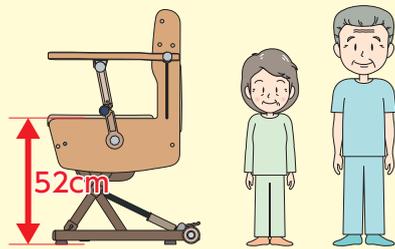

便座高が最高52cmと背の高い方にもお使いいただけます。便座高は無段階調節なので、ご利用者様ひとりひとりに合った高さに調節できます。



肘掛けは斜めの状態でも固定できますので、背の低い方は前方を低く、背の高い方は前方を高くすることによって立ち上がりしやすくなります。




肘掛けはそのまま上下に高さを調節するだけなので、ポータブルトイレ以上のスペースを取りません。

仕様

品名	タスカルC	
品番	8120	8121(ホット便座)
材質	本体/天然木 便座/(表)EVA(裏)ABS バケツ・二重バケツ/ポリプロピレン	
重量	約18kg(ホット便座:約19kg)	
耐荷重	約100kg	
バケツ容量	約10リットル	
電源(ホット便座)	AC100V-35W 便座表面温度(強)34~38℃(弱)31~35℃	
付属品	布製ペーパーホルダー15×1個、ニオワン(消臭剤)×5袋(サンプル)	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283005085	4519283005092(ホット便座)
TAISコード	00129-000266	00129-000267(ホット便座)

規格図

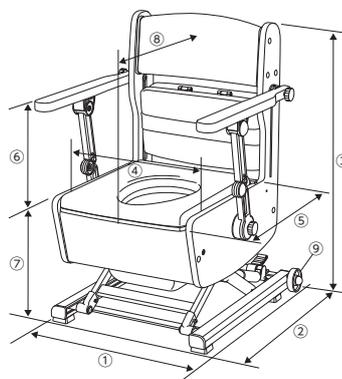

サイズ

① 幅	56cm
② 奥行	64.5cm
③ 高さ	82.5~96cm
④ 座幅(肘~肘)	44.5cm
⑤ 便座奥行	43.5cm
⑥ 肘から前座	0/12.5/20/24.5cm
⑦ 便座高	38~52cm
⑧ 背シート奥行	48cm
⑨ キャスター	直径7cm

uchie®  ウチエ株式会社 <http://uchie.co.jp>
 思いやりをかたちに—

取扱店

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29
 TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372

福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5
 TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332

関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3
 TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312

兵庫工場 〒673-1334 兵庫県東加東市吉井732-1