

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■品番:HB300

¥145,200 (税込)  
(本体価格¥132,000)

# ハイベル

## 折りたたみ自走式シャワーキャリー

- 座面高さ調節
- フットレスト高さ調節
- 短奥行仕様
- 肘掛けはね上げ
- 座シート取り外し
- 段差超え
- ノーパンクタイヤ
- 4輪自在
- フットプレートはね上げ
- フットレスト脱着
- ストッパー
- セーフティ/セーフティロック

※各機能説明はP3~4参照

ストッパー

●駐車用ブレーキ

その他

- 折りたたみ
- サイドガード
- ノーパンクタイヤ



入浴介護用品

排泄介護用品

### 自走、介助どちらにも使えます



#### 握りやすいハンドリム


利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。

### フットレストが取り外せます



フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。

### 簡単に折りたたためコンパクト

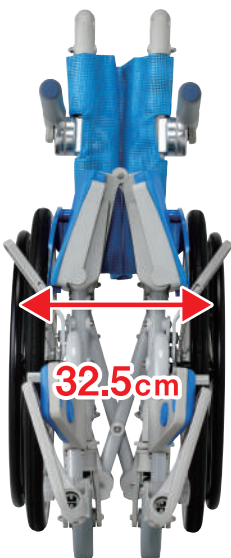


#### コンパクト!

座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押ししてください。簡単に折りたたむことができます。

### 乗り降りがしやすい

脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。

#### 乗り降りがしやすい

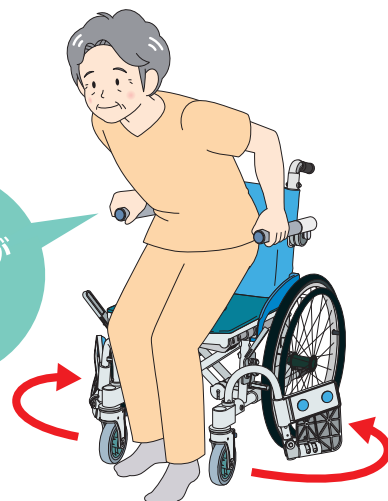


取り外せるシート




座面シートは取り外せて、洗うことが可能です。清潔にお使いいただけます。

サイドガード

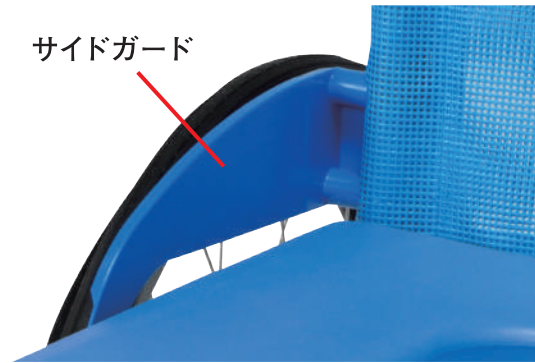

左右のサイドガードが、体が直接タイヤに触れたり、汚れることを防いでくれます。

ティッピングレバー

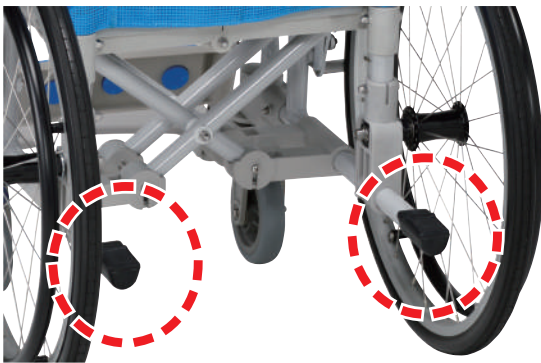

レバーを踏んで前輪を上げ、段差を越えることができます。

取り外せる後輪タイヤ



後輪タイヤは車軸のボタンを押すとかんたんに取り外せします。持ち運びや収納時に便利です。

駐車用ブレーキ

ロック解除




ロックレバーを前方に押すだけでロックが解除されます。

ロック




ロックレバーを後方に引くだけでロックが掛かります。

ロック(レバー収納)

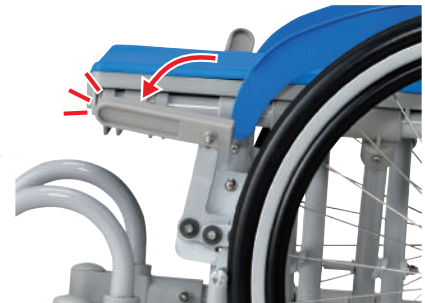

ロックした後、レバーの向きが変わるので、横移乗に邪魔になりません。

規格図

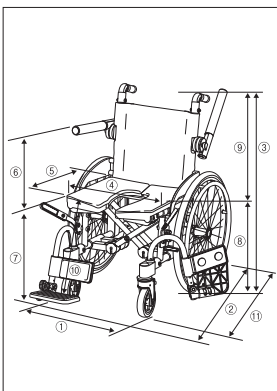

サイズ

① 幅	58,5(32,5)cm
② 奥行	97(95,5)cm
③ 高さ	83(83)cm
④ 座幅(肘～肘)	41,5cm
⑤ シート奥行	38,5cm
⑥ 肘から前座	27cm
⑦ 前座高	44cm
⑧ 後座高	43cm
⑨ 背シート高	30cm
⑩ 前座から足台	40cm
⑪ 奥行(フットレスト無し)	68,5cm
前輪キャスター	6インチ
後輪キャスター	20インチ

※( )は折りたたみ時のサイズ

仕様

品名	ハイベル
品番	HB300
材質	本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品 グリップ/PVC 座シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ タイヤ/PU(発泡) ハンドリム/アルミ
重量	約15kg
耐荷重	100kg
介護保険	購入対象品
JANCODE	4519283005566
TAISコード	00129-000304
*粉体塗装仕上げ	
※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。	