介護保険(購入) 組 立 不 要 特 許 取 得 済

特 定 福 祉 用 具 · 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具

ハイベル

折りたたみ自走式シャワーキャリー

座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様

肘掛けはね上げ 座シート取り外し

ノーパンクタイヤ 4 輪 自 在 フットブレートはね上げ

フットレスト脱着 ▍ス ト ッ パ ー

SAL(セーフティロック)

※各機能説明はP3~4参照

ストッパー

- ●駐車用ブレーキ
- その他
- ●折りたたみ
- ●サイドガード
- ●ノーパンクタイヤ



座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心 を挟むように押してください。簡単に折り たたむことができます。

自走、介助どちらにも使えます


バンドリム

利用者本人がタイヤについているハンドリムを 使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろか ら押して進むこともできます。

サイドガード

■品番: HB300

¥ 145,200 (税込)

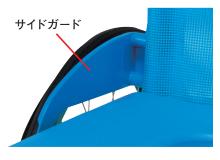

左右のサイドガードが、体が直接タイヤに触れ たり、汚れることを防いでくれます。

取り外せる後輪タイヤ



後輪タイヤは車軸のボタンを押すとかんたんに 取り外せます。持ち運びや収納時に便利です。

乗り降りがしやすい

脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすく なります。



フットレストが取り外せます



フットレストを持ち上げるだけで簡単に取り外 すことが可能です。利用者を抱きかかえなが ら、片手で簡単にフットレストが取り外せます。

手元でロックがかけられます

ロック




ロックレバーを後方に 引くだけでロックが掛 かります。前方に押すと ロック解除されます。

ロック(レバー収納)



ロックした後、レバーの 向きが変えられるので、 横移乗に邪魔になりま せん。

規格図

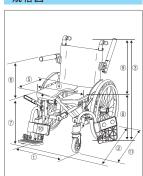

サイズ

① 幅	58.5(32.5)cm
② 奥 行	97 (95.5) cm
③ 高 さ	83(83)cm
④ 座幅(肘~肘)	41.5cm
⑤ シート 奥 行	38.5cm
⑥肘から前座	27cm
⑦前座高	44cm
8 後 座 高	43cm
9 背 シート 高	30cm
⑩ 前座から足台	40cm
① 奥行(フットレスト無し)	68.5cm
前輪キャスター	5インチ
後輪キャスター	20インチ

※()は折りたたみ時のサイズ

仕 様

	品	名:	ハイベル
	品	番:	HB300
	材	質:	本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品 グリップ/ PVC 座シート/ EVA 背シート/ナイロンメッシュ タイヤ/ PU(発泡) ハンドリム/アルミ
_	重	量:	約15kg
┥	耐荷	重:	100kg
	介護保	保険:	購入対象品
4	JANCO	DE:	4519283005566
\dashv	TAIS	−ド:	00129-000304
-	* #/\ / + '	->:±/⊥	L1\$

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。