

介護保険(購入) 組立要 特許取得済
 特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

はいねーるSAL

介護しやすく!座面が上がる!

- 座面高さ調節
- フットレスト高さ調節
- 短奥行仕様
- 肘掛けはね上げ
- 座シート取り外し
- 段差超え
- ノーバンクタイヤ
- 4輪自在
- フットプレートはね上げ
- フットレスト脱着
- ストッパー
- セーフティ/セーフティロック

※各機能説明はP3~4参照

ストッパー

- 足元ストッパー(後輪)

その他

- リクライニング機能
- 可動ハンドル
- 転倒防止バー

U型シート

品番:HN016

¥231,000 (税込)
 (本体価格¥210,000)

U型シート
 ヘッドレスト無し
 品番:HN018

NEW

¥217,800 (税込)
 (本体価格¥198,000)



穴無しシート
 ヘッドレスト無し
 品番:HN017

NEW

¥220,000 (税込)
 (本体価格¥200,000)


穴無しシート
 品番:HN015

¥233,200 (税込)
 (本体価格¥212,000)




上がる座面高

座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。

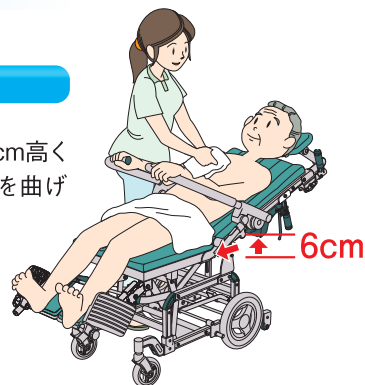


リクライニング時のフットレスト連動が選べます!


背上げ時
 (単位:cm)

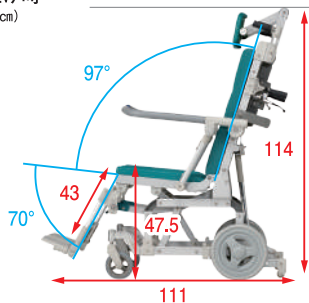

リクライニング時(連動)
 (単位:cm)

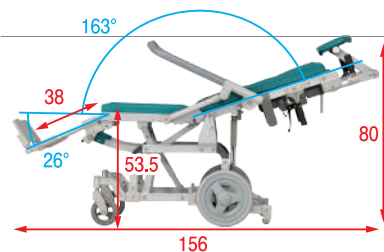


リクライニング時(連動解除)
 (単位:cm)

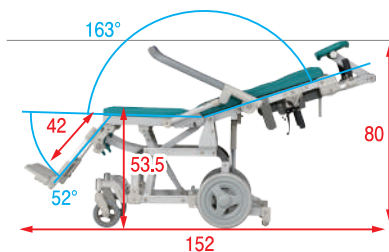

- ハンドル下のリクライニングレバーを握りながら、背もたれを倒します。背もたれは97°~163°の間で無段階に調整が可能です。連動してフットレスが上昇します。連動を解除させることも可能です。リクライニングをすることで、座面にかかる体圧を分散させることができ、座位保持が困難な方の移動がラクになります。 ※背と脚を個別に角度調整する事はできません。 ※記載の角度は概寸になります。

規格図

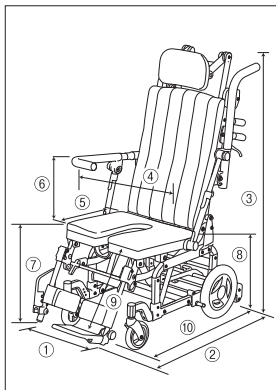

サイズ

① 幅	56cm
② 奥行	111(156)cm
③ 高さ	114(80*) [105(72*)]cm
④ 座幅(肘~肘)	45cm
⑤ シート奥行	40(41.5)cm
⑥ 肘から前座	26(20)cm
⑦ 前座高*3	47.5(53.5)cm
⑧ 後座高*3	44.5(51)cm
⑨ 前座から足台	43(38)cm
⑩ 肘(フットレスト)間	85(125)cm
背もたれリクライニング角度	97°~163°
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	10インチ

※[]ヘッドレスト無し

※(*)最大リクライニング時

※ヘッドレスト最低高さ

*1 肘掛け位置: 87 *2 肘掛け位置: 87

*3 乗車時

仕様

品名	はいねーる SAL	
品番	HN015(穴無し)	HN017(穴無し/ヘッドレスト無し)
	HN016(U型)	HN018(U型/ヘッドレスト無し)
材質	本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品 シート/EVA 車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)	
重量	約 23.5kg(ヘッドレスト無し 約 22kg)	
耐荷重	100kg	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283005146(穴無し)	4519283005955(穴無し/ヘッドレスト無し)
	4519283005153(U型)	4519283005962(U型/ヘッドレスト無し)
TAISコード	00129-000296(穴無し)	00129-000338(穴無し/ヘッドレスト無し)
	00129-000297(U型)	00129-000339(U型/ヘッドレスト無し)

*粉体塗装仕上げ

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。