

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

くるくるチェアD

座面くるくる介護らくらく！
狭い部屋でも移動すいすい！

座面高さ調節	フットレスト高さ調節	短奥行仕様
肘掛けはね上げ	座シート取り外し	段差超え
ノーバンクタイヤ	4輪自在	フットプレートはね上げ
フットレスト脱着	ストッパー	SAL(セーフティロック)

※各機能説明はP3～4参照

座面の高さ調節

5段階

(42～50cm/2cm刻み/O型)
(41～49cm/2cm刻み/穴無し)
(40.5～48.5cm/2cm刻み/U型)

ストッパー

●足元ストッパー(後輪) ●キャスターロック(前輪)

その他

●座面回転機能

■U型シート 品番:KRU-174

¥121,000(税込)
(本体価格¥110,000)



肘掛けが前倒れ防止、
座位保持に使えるSAL
タイプもございます。
※詳しくはP.4参照



SALタイプ

■O型シート
品番:KRU-172

¥121,000(税込)
(本体価格¥110,000)



■穴無しシート
品番:KRU-173

¥123,200(税込)
(本体価格¥112,000)



■O型シート
品番:KRU172SAL

¥127,600(税込)
(本体価格¥116,000)



■穴無しシート
品番:KRU173SAL

¥129,800(税込)
(本体価格¥118,000)



■U型シート
品番:KRU174SAL

¥127,600(税込)
(本体価格¥116,000)




座面は360°回転



座面は360度回転(45度ごとにロック)します。回転ロックレバーを踏み、ハンドルで左右に回すと回転します。
短奥行仕様時にフットプレートを折りたたんだ状態での回転操作は座面高さ3段階目からとなります。

ストッパーがついて安心

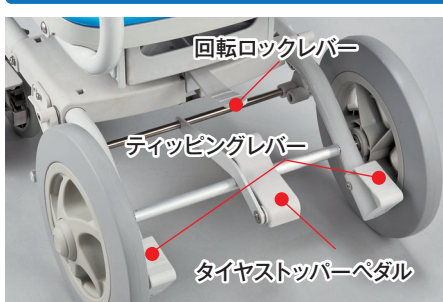

足元ストッパー採用。片足でワンタッチロックできます。前輪キャスターはキャスター毎のロックになります。後輪はノーバンクタイヤです。
※後輪ストッパーをかけないと回転ロックレバーを押しても座面の回転はできません。

さらにコンパクトに！




短奥行仕様



全てのシートタイプで
付け替え可能です。

規格図

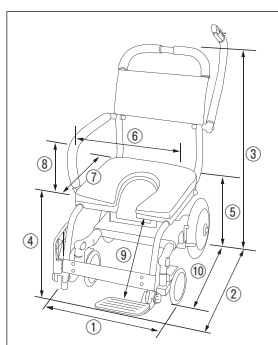

サイズ

① 幅	47[50.5]cm
② 奥行	85(70)cm
③ 高さ(ハンドル高さ)	86～94cm
④ 前座高	42～50cm(O型) 41～49cm(穴無し) 40.5～48.5cm(U型)
⑤ 後座高	40～48cm
⑥ 座幅(肘～肘)	39[40.5]cm
⑦ 座奥行	40cm
⑧ 肘から前座	20[25]cm
⑨ 前座から足台	33/35.5/38cm
⑩ 肘(ワットスト)	57.5cm
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	10インチ

※() 内の数字は短奥行仕様時のサイズです。
※[] は SAL タイプ

仕様

品名	くるくるチェアD	
品番	KRU-172(O型) KRU-173(穴無し) KRU-174(U型) KRU172SAL(SAL O型) KRU173SAL(SAL 穴無し) KRU174SAL(SAL U型)	
材質	本体/アルミ*、ステンレス* シート/ EVA 背シート/ナイロンメッシュ	
重量	約 13kg(SAL 約 14kg)	
耐荷重	100kg	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283002572(O型) 4519283002589(穴無し) 4519283002596(U型)	4519283005610(SAL O型) 4519283005627(SAL 穴無し) 4519283005634(SAL U型)
TAISコード	00129-000108(O型) 00129-000109(穴無し) 00129-000089(U型)	00129-000309(SAL O型) 00129-000310(SAL 穴無し) 00129-000311(SAL U型)

*粉体塗装仕上げ ※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。