

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

# くるくるチェアII SAL

ハンドル角度調節・360°座面回転可能  
コンパクトシャワーキャリー

- 座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様
- 肘掛けはね上げ 座シート取り外し 段差超え
- ノーバンクタイヤ 4輪自在 フットプレートはね上げ
- フットレスト脱着 ストッパー セーフティ/セーフティロック

※各機能説明はP3~4参照

## 座面の高さ調節

- 5段階**
- (42.5~50.5cm/2cm刻み/O型)
  - (41.5~49.5cm/2cm刻み/穴無し)
  - (41~49cm/2cm刻み/U型)

## ストッパー

- 足元ストッパー(後輪) ●キャスターロック(前輪)

## その他

- 座面回転機能

■U型シート 品番:KRU188

¥119,900(税込)  
(本体価格¥109,000)



■O型シート 品番:KRU186

¥119,900(税込)  
(本体価格¥109,000)



■穴無しシート 品番:KRU187

¥122,100(税込)  
(本体価格¥111,000)

## 座面は360°回転




座面は360度回転(45度ごとにロック)します。回転ロックレバーを踏み、ハンドルで左右に回すと回転します。短奥行仕様時にフットプレートを折りたたんだ状態での回転操作は座面高さ3段階目からとなります。

## さらにコンパクトに!




フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行78.5cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)

## 握りやすいハンドルグリップ

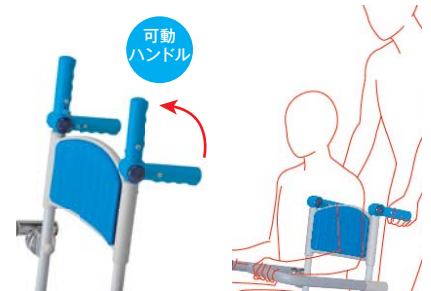

ハンドルの角度がかんたんに変えられます(3段階)ハンドルグリップで握りやすく介助しやすいです。

## 規格図

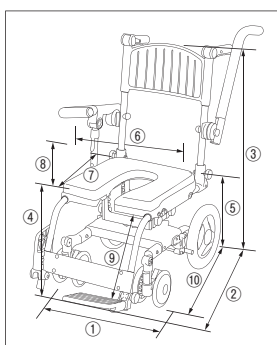

## サイズ

|              |  |
|--------------|--|
| ① 幅          | 50.5cm   |
| ② 奥行         | 95(78.5)cm   |
| ③ 高さ(ハンドル高さ) | 87~95cm  |
| ④ 前座高        | 42.5~50.5cm(O型)<br>41.5~49.5cm(穴無し)<br>41~49cm(U型) |
| ⑤ 後座高        | 40~48cm  |
| ⑥ 座幅(肘~肘)    | 41cm   |
| ⑦ 座奥行        | 40cm   |
| ⑧ 肘から前座      | 25cm   |
| ⑨ 前座から足台     | 33/35.5/38cm                                       |
| ⑩ 奥行(ワトス取)   | 65cm   |
| 前輪キャスター      | 5インチ   |
| 後輪タイヤ        | 10インチ  |

※( )内の数字は短奥行仕様時のサイズです。

## 仕様

|         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| 品名      | くるくるチェアII SAL                          |                    |
| 品番      | KRU186(O型) KRU187(穴無し) KRU188(U型)      |                    |
| 材質      | 本体/アルミ*、ステンレス* シート/EVA 背シート/EVA        |                    |
| 重量      | 約15kg                                  |                    |
| 耐荷重     | 100kg                                  |                    |
| 介護保険    | 購入対象品                                  |                    |
| JANCODE | 4519283005788(O型)<br>4519283005801(U型) | 4519283005795(穴無し) |
| TAISコード | 00129-000326(O型)<br>00129-000328(U型)   | 00129-000327(穴無し)  |

\*粉体塗装仕上げ

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。