介護保険(購入) 組 立 不 要 特 許 取 得 済

特定福祉用具·特定介護予防福祉用具

楽チルSAI

肘掛けが前倒れ防止に… シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー

座面高さ調節 フットレスト高さ調節

肘掛けはね上げ

※各機能説明はP3~4参照

座面の高さ調節

4 段階

(45.5~51.5cm/2cm刻み/O型) (44.5~50.5cm/2cm刻み/穴無し) (44~50cm/2cm刻み/U型)

ストッパー

●足元ストッパー(後輪) ●キャスターダブルロック(前輪)

その他

●チルト機能



■O型シート 品番:RT-001SAL

■穴無しシート 品番:RT-003SAL



■O型シート 品番:RT-002SAL

¥ 166,100 (稅込)



■穴無しシート 品番:RT-004SAL

¥ 168,300 (税込) (本体価格¥153.000)



■U型シート 品番:RT-006SAL


¥ 166,100 (税込) (本体価格¥151.000)



前倒れ防止に使えるセーフティロック






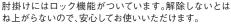

肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの 前を持つことによって座位保持がしやすくなります。 肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。

規格図

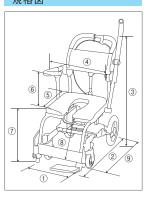

7 1 2 1	
① 幅	50cm
② 奥 行	98.5(111)[103.5(122)]cm
③ 高 さ	92.5~98.5(83~89)cm [119~125(110~116)]cm
④ 座幅(肘~肘)	40cm
⑤ 座 奥 行	40cm
⑥ 肘から前座	25cm
⑦前座高	45.5~51.5cm(O型) 44.5~50.5cm(穴無し) 44~50cm(U型)
⑧ 前座から足台	44.5/47/49.5cm
⑨ 奥行(フットレスト無し)	67.5(78.5)[74(96.5)]cm
最大チルト角度	22°
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	10インチ

※()最大チルト時※[]ヘッドレスト D 付き時(ヘッドレスト最低高さ)

かんたん操作で楽々チルト!



チルトレバーを握りながらハンドルを 押し下げるとチルトができます。ガスシ リンダータイプなのでスムーズです。

(6°~22°、無段階)※実際のチルトレバーは右側についています。



名: 楽チル SAL

RT-001SAL(O型) RT-002SAL(O型/ヘッドレストD付き) 品 RT-004SAL(穴無レ/ヘッドレストD付き) RT-006SAL(U型/ヘッドレストD付き) RT-003SAL(穴無し) RT-005SAL(U型)

材 質: 本体/アルミ*、ステンレス* シート/ EVA 背シート/ナイロンメッシュ

量 : 約 15kg(ヘッドレストD付き 16kg) 重 荷 重: 100kg 耐

介護保険: 購入対象品

仕

밂

4519283004699(0型) 4519283004705(0型/ヘッドレストD付き) JANCODE : 4519283004712(穴無し) 4519283004736(U型) 4519283004729(穴無し/ヘッドレストD付き) 4519283004743(U型/ヘッドレストD付き)

00129-000235(0型/ヘッドレストD付き) 00129-000237(穴無レ/ヘッドレストD付き) 00129-000239(U型/ヘッドレストD付き) TAIS⊐-ド: 00129-000234(0型) 00129-000236(穴無し) 00129-000238(U型)

* 粉体塗装仕上げ

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。