

タスカル手すり

立ち上がり、
排泄姿勢をサポートします

肘掛けの高さ調節

無段階 (66.5~132cm)


肘掛け

●はね上げ ●セーフティ

その他

●アジャスター

工事不要、工具不要で
設置できます。

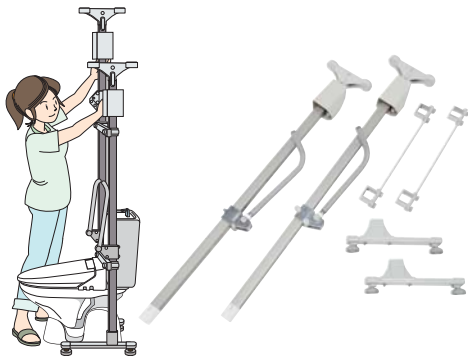

- 天井と床に突っ張り棒のように固定します。
- 工事不要、工具不要で一人でも取付け可能です。
- 住宅改修のできない場所でも設置可能。
- ネジを使用しないので、撤去も簡単です。

一人でも取り付け可能!

RENEWAL
リニューアル


2018年4月発売予定

■品番:TT-1030
¥78,000 (税抜)

洋式、和式
どちらも
使えます!

セーフティ

肘掛けが
前倒れを防ぎます。
ソフトクッションです。

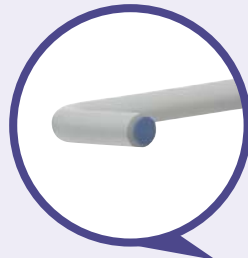

排泄姿勢がとりやすい



セーフティ肘掛けは、利用者の前方まで回っているので前傾姿勢がとり易いです。脚部は短く、足引きスペースがとり易いです。排泄姿勢をサポートします。



肘掛けをはね上げることができますので、移動の際に邪魔になりません。肘掛けを複数つけている場合にも、必要な肘掛けのみ下ろして使うことができます。

肘掛けの高さを利用者様の状態に合わせて調整することができます

柱にメモリシールが貼ってあるので、メジャーが無くても左右平行に肘掛けの高さが調節できます。
※肘掛け高さ調節範囲 66.5～132cm(内、メモリシール範囲68～86cm)




肘掛けの高さが無段階調節可能。利用者様の状態に合わせて調整することができます。座っても立ってもお使いいただけます。



トイレの立ち座りや、向きの変更、排泄時やズボンの上げ下ろしの際などにつかまることで姿勢が安定し、動作が楽になります。

ゴム付きで床や天井にキズをつけません

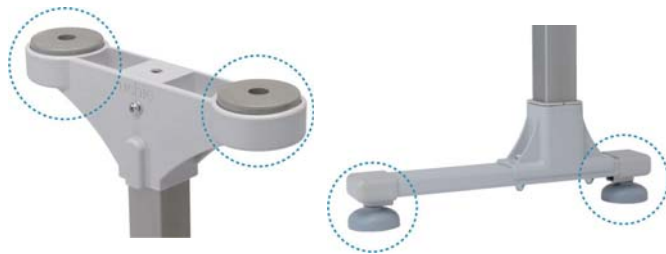

設置部分にゴムを使用。床や天井にキズをつけません。床部分のゴムはアジャスターがついていますので、微調整ができます。

目で見てわかるお知らせサイン



赤ラインが見えてきたら、設置強度が不足していることをお知らせしています。
※その時は設置しなおしてください。

肘掛けを増やすことができます



オプションで肘掛けを増やすことができます。肘掛けを増やすことによって、立ち座り両方に対応できます。その都度、高さ調節する手間がいりません。

タスカル手すり用 肘掛け

品番: 7084
JANCODE: 4519283004859


タスカル天板で力を分散設置



タスカル天板

付属品のタスカル天板を梁と梁の間に這わすことによって、力を分散して設置することができます。滑り止めゴム付き。

規格図

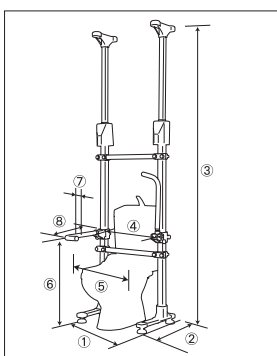

サイズ

① 幅	67.5cm
② 奥行	70.5cm
③ 高さ	169～285cm
④ 座幅(肘～肘)	53cm
⑤ 肘外から肘外	60cm
⑥ 床から肘掛け	66.5cm
⑦ 肘掛け幅	3.5cm
⑧ 肘掛け長さ	53cm
対応天井高さ	190～260cm

仕様

品名	タスカル手すり
品番	TT-1030
材質	アルミ、PP、ステンレス、合成ゴム
重量	約 13.5 kg
付属品	タスカル天板
介護保険	貸与対象品
JANCODE	4519283003920
TAISコード	00129-000192

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。