

ウチエだより



いつもウチエの商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
春とはいっても朝夕はまだまだ冷え込みますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて今回は、ウチエの新商品シャワーキャリー『くるくるセーフティ』をご案内いたします！

座位保持が難しい方に～
回転座面シャワーキャリー

くるくるセーフティ

0型/U型 ¥108,000 (税抜¥100,000)

穴無し ¥110,160 (税抜¥102,000)

サイズ：幅 47×奥行 86(71.5)×高さ 86～94cm
座幅 39.5×座奥行 40cm、
※()は短奥行仕様時

材質：本体/アルミ、ステンレス
シート/EVA


重量：約 13.5kg




360° 回転座面



4月発売予定！

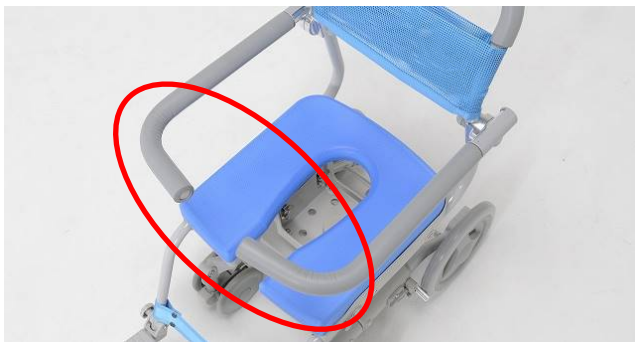

肘掛けの前ハンドルを握ることによって、座位保持がしやすくなります。また、前ハンドルがあることにより、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。肘掛けをはね上げるので、乗り降りの邪魔になりません。

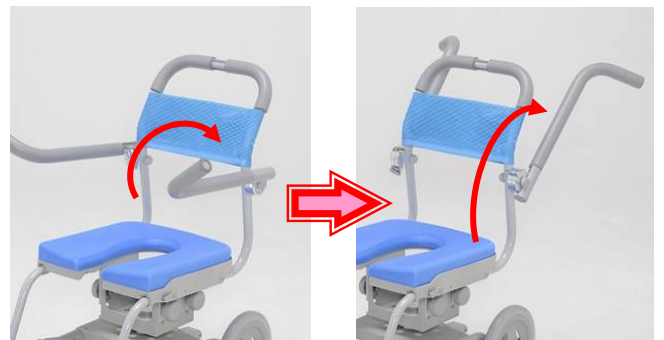

乗り降りの際は前ハンドルを外側に回してください。肘掛けをはね上げる際も前ハンドルを外側に回してからはね上げます。肘掛けは簡単に回ります。

生活を豊かにする 福祉用具

浜田 きよ子

夜中にトイレに行きたくて目が覚めて、トイレに行ったのはいいけれど、その後がなかなか寝付けないことがあります。そんなときにはポータブルトイレが役に立つのですが、まだそこまでは不要という人も少なくありません。写真はバケツを外せば折り畳めるポータブルで、畳めば直立しますから場所をあまりとりません。座面の高さは調節でき、肘掛けも跳ね上げ可能です。座面は柔らかく、肘掛けはウレタン仕様により冷たくありません。何より丸ごと洗えて清潔ですし、移動のための車輪も付いているなど、

このポータブルトイレ自体、大変使いやすいよう工夫されています。

車をとれば急に体調を崩すこともあります。そんなときにこのポータブルトイレがあれば、おむつを使わなくて済むかもしれません。それに万一の災害時にも役に立ちます。介護保険の認定を受けている人はケアマネジャーさんに相談してください。費用負担が少なくて済みます。

お問い合わせ＝ウチエ㈱ ☎06・6482・0230

(高齢生活研究所所長)



ポータブルトイレ「たためる」

「農業共済新聞」にポータブルトイレ『たためる』が紹介されました！

折りたためるポータブルトイレです。必要ない時はコンパクトに収納できます。利用者様の状態に合わせて、気軽にお使いいただけるトイレです。デモ機を用意しております。ご希望がありましたら発送させていただきます！



◇次回からはメールにてお送りさせていただきます。よろしければメールアドレスを弊社アドレス (amagasaki@uchie.co.jp)、FAXにてお教え下さい。