


# ウチ卫 だより



いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。  
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？  
今夏、シャワーキャリーが季節柄たくさんご注文いただきました。ありがとうございます。  
ご購入いただいたあとに、うっかりこんなことをしてしまった！という困ったご相談の中で、特に注意していただきたいご相談内容を列挙してみました。  
是非ご利用者様にもお伝えいただけますと助かります。

Q EVA ウレタンを天日干ししています

A EVA ウレタンは天日干しするとウレタンが縮んでしまいますので止めてください。

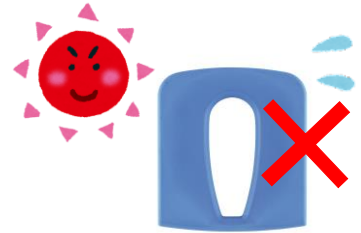

Q シャワーキャリーに入浴剤入りのお湯をかけたら動かしくくなりました

A 入浴剤の細かい粉が可動部に入り、動かなくなることがありますので入浴剤を入れたお湯はかけないでください。

Q シャワーキャリーにカビ取り剤をかけても良いですか？

A カビ取り剤をかけると樹脂部品を痛めますのでやめてください。

Q 長期の入院等があり在宅でシャワーキャリーをそのまま放置していたら動かなくなった

A 急な入院等、大変ですが、シャワーキャリーは長期に放置しますと可動部に残っている石鹸カスが固まり、動かなくなることがありますので、定期的に可動部を動かす、注油する等お願いします。



多数のご来場  
ありがとうございます！  
第50回国際福祉機器展

9月27日から29日の3日間、国際福祉機器展にお越しいただき、ありがとうございます。大盛況のうちに終わることができ、大変感謝しております。出展いたしました新商品をはじめ弊社商品にご興味ございましたら、各地区の営業担当者をご説明に伺いますので是非ご連絡ください。



◆ウチ卫全商品のデモ機がございます。お貸出は1週間～10日程でお願いしております。衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！

