

ウチエだより

身体機能の低下により、ご自宅のトイレ利用が厳しくなった際に
いかにしてトイレの利用を続けられるか？ 方法は色々あり
ますが、そのひとつにシャワーキャリーがございます。
今回は洋式トイレ設置タイプ「シャトレチェアシリーズの最低環境
条件Ⅲ」をご案内いたします！

シャトレチェアC

¥115,500

(税抜¥105,000)

※0型、U型



全幅 59.5 × 全長 91.5 cm

シャトレチェア6輪

¥132,000

(税抜¥120,000)

※0型、U型



全幅 56 × 全長 95.5/84.5
(フットレスト無し 69) cm

シャトレチェアLUⅡSAL

¥137,500

(税抜¥125,000)

※U型



全幅 50.5 × 全長 92
(フットレスト無し 64.5) cm

シャワーキャリーを洋式トイレに設置する
ためにはトイレ入り口からバックで入って
行きます。
全ての洋式トイレに設置は出来ず、
最低環境条件が次のようになります。



Point 1 トイレ入口に段差が無い。

段差 1~2cm であれば
スロープ利用で
可能な場合も



Point 2 トイレ入口の間口

商品全幅より間口が広い
シャトレチェア C :
全幅 59.5 cm
シャトレチェア 6輪 :
全幅 56 cm
シャトレチェア LUⅡ
SAL : 全幅 50.5 cm



Point 3 洋式便器の床幅

シャトレチェア C :
35.5 cm 未満
シャトレチェア 6輪 :
29.5 cm 未満
シャトレチェア LUⅡ
SAL : 29.5cm 未満




3点以外にも、トイレ前の廊下が狭い場合やト
イレ横壁に手すりが付いている場合、便座奥部
が反り上がっている場合等あります。
また、便座フタの縁で奥まで入りきらない場合
もあり、その場合は便座フタをとり外すと奥ま
で入る場合があります。まずはデモ機でお試し
ください。



3機種ともオプション
のバケツが取付け可能
です。


UCHIE DAYORI

シャトレチェアシリーズは商品選定の時に便器のフォルムにいちばん左右されてしまいます。デモ機で確認後に便器を交換する住宅改修をしてしまうなどのうっかりミスもたまに聞きますので気を付けてください。床にある配管に当たる、壁に固定されているペーパーホルダーに肘掛けが当たるなど、意外な所に干渉するケースもあります。

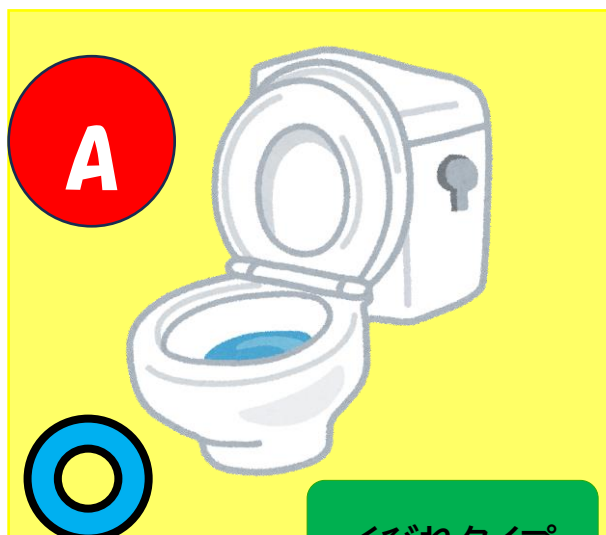


くびれタイプ

シャトレチェアシリーズはイラストA, イラストDのように便器にくびれのある形のトイレには相性もよく、便器をまたぐことができますが、B、Cのような形状では入れようとしても途中でどこかに当たる、ひっかかることがあります。寸法を測るだけでなく、デモ機で実際に入るか確認をすることをおススメしています。

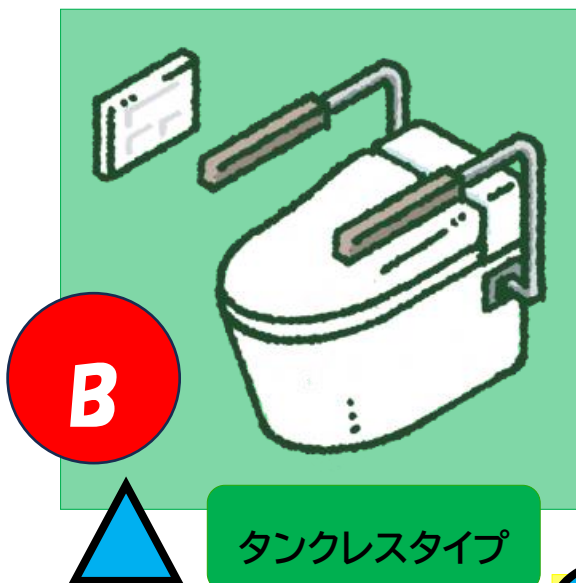

タンクレスタイプ

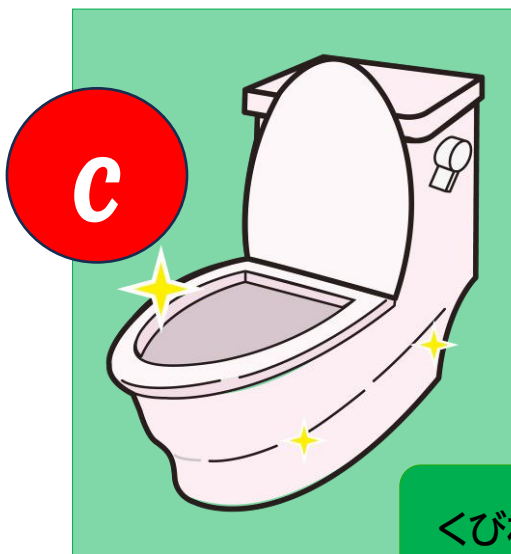

くびれなしタイプ



壁固定タイプ