

ウチエ だより

2024/07

Vol.113

7月8日発売

ハイベル SW (介助車用)



全幅 52.5cm



後輪 10 インチタイヤに
なりました。



折りたたむと
幅 28cmに
なりました。

全長 84.5cm

uchie  ウチエ株式会社
思いやりをかたちにする

本社/大阪営業所
関東営業所
福岡営業所

兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29
千葉県松戸市三矢小台 4-12-3
福岡県糸島市波多江駅北 4-6-5

TEL:06-6482-0230
TEL:047-362-0311
TEL:092-323-4331

FAX:06-6401-6372
FAX:047-362-0312
FAX:092-323-4332


ウチエだより

よくあるお問い合わせにお答えします

お問い合わせ内容：はいねーる SAL/シャワーラクリク SAL のヘッドレスト付でリクライニングレバーの取り付けができないのですが？

背部分をベース部に差し込んだ後からご案内させていただきます。

2024/6 現時点での仕様です。

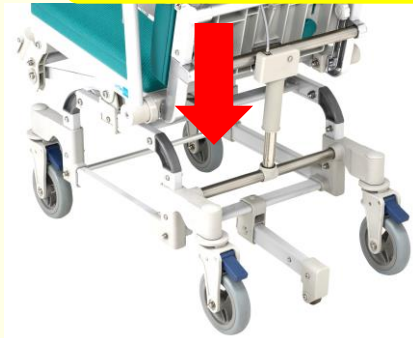

① 背部をベースフレームに差し込み、ねじ止めをします。





ヘッドレスト調節レバー

背部補強パイプ

リクライニングレバー

② リクライニングレバーをヘッドレスト調節レバーと背部補強パイプの間から通します。

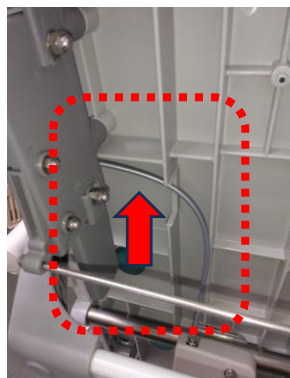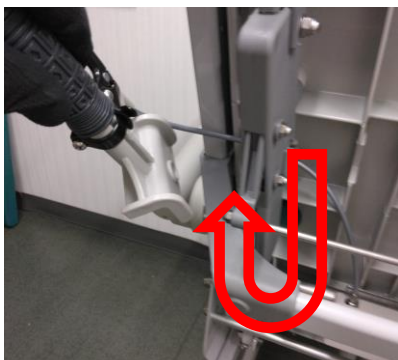

③ リクライニングレバーのワイヤーのみをヘッドレストを差し込むグレーの部品と背部の間に下から通します。



④ リクライニングレバーをネジ止めして完成です。