

ウチ卫 だより



いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて今回は、ポータブルトイレについてお問い合わせの多い件例をご案内させていただきます。

Q 『さわやかチェアPT』と『さわやかチェア泉Ⅱ』は何が違うのですか？

A さわやかチェアPT(以下PT)とさわやかチェア泉Ⅱ(以下泉Ⅱ)は基本機能は同じです。

値段面からするとPTは跳ね上げ式・ソフト便座で他社品と比べても最もエコノミーで機能性のあるお勧め商品です。

違いとして泉Ⅱは座面角度が調整できます。PTと比べ丸みのあるデザインが特徴です。また、泉ⅡはPTと比べ脚部を外側に出しているため横からの荷重に強いです。




さわやかチェアPT さわやかチェア泉Ⅱ

Q 便座を水洗いしても大丈夫ですか？

A 大丈夫です。汚れがひどい際はスポンジに中性洗剤を付けて洗って下さい。耐熱温度 80℃ですので熱湯をかけないで下さい。ウェットティッシュで便座を拭くとアルコールで表面が色落ちしますのでウェットティッシュは使用しないで下さい。

Q 便座の穴の大きさは？

A 通常便座、ホット便座は右写真のようになります。
ソフト便座で穴が大きい方にはホット便座の方をお勧め致します。どちらもソフト便座になります。

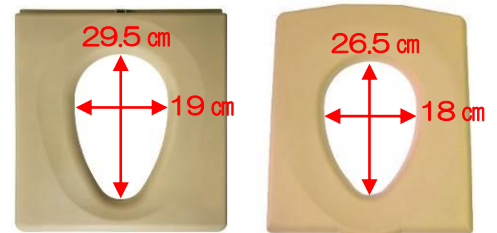

通常便座

ホット便座

Q タスカルHL チルトのチルト機能は何のためですか？

A チルト機能は、ポータブルトイレとして利用しない時に昇降椅子として利用し、座りやすい角度にして頂けます。また、通常設定で前座角が後座角より 3° 低くなっていて立ち上がりやすい設定にしておりますが、前のめりになる方や横移乗しやすいようにその場合はチルトレバーでフラットに設定できます。



第43回国際福祉機器展H, C, R, 2016に出展します！

会期：2016年10月12日(水)～10月14日(金) 10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト東展示ホール 東4ホール 4-03-09

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

◆ウチ卫全商品のデモ機がございます。お貸出は1週間～10日程でお願いしております。
衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！

