

このたびの新型コロナウイルスに罹患されたお客様及び関係各所の皆様に心よりお見舞い申し上げます。



さて今回は、新型コロナウイルスの影響によりデイサービスやショートステイ等を利用者がサービス利用を控える動きが出ており、自宅にてお風呂に入りたい、入れてあげたいというご要望がございますので、在宅でのシャワーキャリーの選定のポイントをご案内いたします。

## 選定ポイント①



### お勧め商品と特徴

#### シャワースカールド

全幅53.5×全長86cm



Ⓛ

- ・タイヤが大きく段差に強く操作性が良い
- ・折りたたみ出来る

Ⓢ

- ・フットレストが外せない
- ・座高調節不可

#### くるくるセーフティ

全幅47×全長85と70cm



Ⓛ

- ・コンパクト
- ・回転スペースの有効利用
- ・フットレストが外せる
- ・短奥行き仕様で全長が短くできる
- ・タイヤ大きめ
- ・座高調節可能

Ⓢ

- ・回転の必要がない方

#### シャワーラクV

全幅47×全長92と69cm



Ⓛ

- ・コンパクト
- ・フットレストが外せる
- ・短奥行き仕様可能
- ・タイヤが大きめ
- ・座高調節可能

Ⓢ

短奥行き仕様だとだいぶ膝があがるので短奥行き仕様にした場合はシャワーラクを

#### シャワーラク4輪自在V

全幅47×全長84.5と73.5cm



Ⓛ

- ・小回りが効き横にもななめにも動く
- ・コンパクト
- ・フットレストが外せる
- ・短奥行き仕様可能
- ・座高調節可能

Ⓢ

- ・段差があれば使えず
- ・4ヶ所ロックを嫌がる方も

全ての商品で肘掛けははね上げ可能です。また、肘掛けタイプを通常タイプとセーフティタイプから選べます。セーフティタイプは転倒防止、姿勢保持や大柄な方には窮屈ではなくお勧めです。

## 選定ポイント②

## 住環境・移乗・移動の確認

## 住環境

## 動線確認

お部屋からお風呂までの移動や曲がり角や狭い通路を通れるか

## 段差確認

越えられるか（1cm弱の段差で4輪キャスターの場合、バックからだると越えられる事も有り）

## お風呂の確認

- ・ドア：1枚ドアで内開きや折れ戸が閉まるか
- ・入口のパッキン：段差がなくてもパッキンでひっかからないか
- ・湯船：湯船に入る場合は座高が合うか
- ・シャワーキャリーの位置：どの向きで使いたいか

## 移乗

利用者及びマンパワーによるものか

- ・ベッドからの移乗が可能か否か
- ・移乗後は座位をとれるのか
- ・シートの選択 U型：局部洗浄がしやすい  
O型：足が細いとU型の先端の穴に落ちるのでO型に  
穴無：痩せていて穴有りだとお尻が落ちるや違和感がある方に
- ・座高が合うか 床に足が付かないと厳しい方もいる

## 移動

マンパワーによるもの



- ・人が座っているのといないのでは雲泥の差なので人が座っての移動確認
- ・段差があれば段差上げ出来るか否か
- ・お風呂場のドアが1枚の内開きだとシャワーキャリーを入れて閉まるか
- ・曲がり角や狭い通路の場合、曲がれるか（切り返し出来るか）否か
- ・商品によって操作性や移動性の違いがあることの確認

ウチエ全商品のデモ機がございます。

お貸出しは1週間～10日程でお願いしております。

衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます。

しっかり消毒を  
行っております