

# ウチ卫だより



いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。  
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？  
さて今回は、ウチ卫のポータブルトイレ『**タスカルH L s t**』をご案内いたします！

## タスカルH L s t の選定ポイント

### ■肘掛け

はね上げ式で移乗しやすいです。立位ができない場合、ベッドから座位のまま移乗できます。肘掛けの上げ下げの動作は簡単に行なえます。肘掛けのスライドパイプが斜めに設計されているので足を広げて座ることができ、安定した姿勢を保てます。肘パッドはやわらかく長時間肘を置いて痛くありません。

### 無段階調節できる 電動昇降トイレ



### ■昇降

便座の高さは人を乗せたまま、電動アクチュエーターリモコンボタンを押して昇降できます。便座高は 29.5~65cm 対応できます。膝が曲がらない方は、立った状態で座面をお尻の高さに合わせ、腰かけてから膝の高さまで座面を下げます。楽に排泄姿勢がとれます。

### ■座面角度

前座面の角度が後座面より 2° 低くなっているので、前傾姿勢が取りやすく、排泄しやすいです。仙骨座りを防止します。

### ■便座

EVA 素材なので汚れたら洗うことができます。

### ■ホット便座

寒い時期は暖房便座が選べます。

### ■バケツ

二重バケツで万が一の漏れにも安心です。

品番:8130

¥98,800(税抜)

### ■車輪

4 輪で後方キャスターはダブルロックになっています。施設内、病院内の移動も楽にできます。

### 【対象の方】

- ・歩行が困難な方、介助が必要な方。
- ・ベッドからポータブルトイレに移乗がむずかしい方、立ち上がりがつらい方。
- ・老々介護で排泄作業の負担がある方
- ・座位がとれる方。
- ・自宅のトイレに行くまでに排尿してしまう方。

### 【留意点】

- ・座面の高さは、利用者に乗せて足のかか上がらない程度で調節してください。
- ・上げすぎに注意してください。
- ・座位がとれるかどうか、確認してください。
- ・利用者に乗せて移動しないでください。
- ・電源をコンセントにつないで移動しないでください。



ウチ卫全商品の**デモ機**がございます。お貸出は 1 週間～10 日程でお願いしております。  
衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！



uchie®  
思いやりをかたちに

本社/大阪営業所 兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29 TEL 06-6482-0230 FAX 06-6401-6372