



# ウチエだより

VOL.73/2020.12



いつもウチエの商品をご利用いただき誠にありがとうございます。2020 年も残りあと僅かとなりました。来年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願ひ申し上げます。

さて今回は、ウチエのシャワーキャリー『シャトレチェアLU』をご案内いたします！

## シャトレチェアLUの選定ポイント

### ■背シート

柔らかいEVA 素材なので、楽に座れます。シートは、簡単に取り外しできるので清潔です。

■ハンドル 3段階の角度調節ができるので、狭い浴室や洋式トイレ装着時に干渉せずに利用できます。

### ■肘掛けセーフティ

はね上げて横移乗ができます。前方のグリップを握って座位保持が可能。転倒リスクも安心です。

座位保持がしやすい

### ■洋式トイレ

座面高は、47～54 cmの間で5段階調節が可能。洋式トイレに装着できます。排尿する時は、尿はねブロックに尿をあて、便器内に誘導するので尿はねを防ぎます。

### ■U型シート

簡単に取り外しできてお手入れもラク。長く使用できます。柔らかくEVA 素材採用。

### ■バケツ

お部屋から浴室へ移動する時の突如の便意尿意に安心。バケツを取り付けることが可能です。

### ■キャスター

小回りができる4輪自在キャスター。ダブルロックタイプで安全に利用できます。

### ■フットレスト

利用者を抱きかかえながら、簡単に上から取り外しが出来ます。スイングアウトも可能です。

全幅 47cm とコンパクト。  
全長は 93cm。  
移動の通路幅、浴室の間口などを考慮。  
洗い場でスペースを確保できます。

### U型シート

品番:STR6212

¥108,000(税抜)

### U型バケツ付

品番:STR6214

¥111,000(税抜)

### 【対象の方】

- ・歩行が困難で、介助が必要。
- ・歩く時間が掛かる。
- ・介助の時間や負担の軽減が可能。
- ・老々介護の入浴作業の負担を軽減

### 【留意点】

- ・座位がとれるかどうか。
- ・商品の操作を行う介助者の確認と移乗確認(住宅改修との併用)
- ・使用場所、移動通路、段差、幅の確認
- ・洋式トイレの寸法の確認
- ・移動中、ステップに足を乗せていないと怪我の恐れがある。
- ・ステップに足を乗せてままだたない。必要以上に前傾姿勢をとらない。前倒れに注意する。
- ・4輪自在なので、段差上げが難しい。
- ・背シートは現状のタイプのみ。メッシュタイプは未対応。

ウチエ全商品のデモ機がございます。お貸出は1週間～10日程でお願いしております。衛生面から美使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！

