

いつもウチヱの商品をご利用いただき誠にありがとうございます。今月のウチヱだより 9 月号では普段よりお問い合わせの多い項目から幾つか代表的なものをピックアップし回答 例を掲載させていただきます。

コロナウィルスの新規感染者数も留まる事を知らず、弊社においても引き続き感染拡大の 防止及び消毒の徹底を行ってまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

## 0型とU型シートの違いは?

⋃型は臀部の洗浄が下から行いやすい形状となって おります。足の細い方など隙間から足が入り込む可 能性がある場合は○型がオススメです。この他、穴 無しシートも御用意いたしております。





## 固定と自在タイヤの違いは?

作業動線、浴室内の空間などに 余裕がある場合は固定タイプ。 動線上、空間内で細かい動きが 必要な場合は4輪自在タイプ となっております。段差越えな どがある場合は固定タイプを オススメしております。車体全 体の転回幅や直進走行時の安 <u>定感</u>に違いがあります。



※固定タイヤ



# 跳ね上げとセーフティの違いは?

#### ※セーフティタイプはオプションとなっております。

御利用者様の身体状況により 使い分ける形になります。前倒 れ防止、座位の保持にはセーフ ティタイプがオススメです。





身体の前で握る事で安心感も あり、太腿付近に空間がある事 で跳ね上げタイプと比べゆっ たりと座れる感覚があります。

※跳ね上げタイプはロック機能、楽チル/シャワースカール以外のセーフティタイプはフリーとなっております。 (21年8月現在)

## Vシリースとは?

※V シリーズはオプション品となっております。





両手を使う必要が無いので御利用者様を抱きかか えながらでも<u>簡単にフットレストの脱着が可能</u>で す。プレート部分は通常タイプは3段階、V シリ ーズは2段階の高さ調節可能。各シャワーラクタ イプでは短奥行仕様も可能となっております。



本社/大阪営業所

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29

TEL: 06-6482-0230 / FAX: 06-6401-6372

◆ウチヱ全商品のデモ機がございます。お貸出は 1 週間~10 日程でお願いしております。ご希望がありましたら順 次対応をさせていただいております。※衛生面から実使用は出来ません。◆次回からはメールにてお送りさせて頂き ます。よろしければメールアドレスを弊社アドレス(info@uchie.co.jp)、FAXにてお教え下さい。