

ウチエだより



いつもウチエの商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ さて今回は、よくあるお問合せでシャワーキャリーのメンテナンスについてご案内致します！

👉 ネジの定期確認について

使用頻度にもよりますが、各種ネジは2～3か月に1回は緩み等を確認して下さい。
主に確認して頂くのは高さ調節ネジとフットプレートネジですが、特に高さ調節のネジは商品の安全性に直結しますので、座っていてガタつく症状が出ましたらすぐに確認して頂くようお願い致します。



👉 保管状況について

使用後は座面を外し風通しの良い所で陰干しして保管して下さい。
日干しで直射日光に当てますと、紫外線の影響で座面や手すりが劣化しますのでご注意ください。
尚、使用後に冷水を本体全体に掛けて温度を下げて頂くとカビが生えにくくなります。



👉 お掃除について


掃除するタイミングは使用頻度によって変わりますが、目安としては週に2～3回ご利用頂く方で月に2回程度、中性洗剤で洗って下さい。汚れ具合によっては、その都度掃除して下さい。

酸性、アルカリ性の洗剤だと本体の劣化を早める可能性がございますので使用しないようお願い致します。



👉 補足

どうしても汚れや劣化が気になる場合は個別に部品の交換が可能です。ハンドル、手すり、背メッシュシート、(背パッド)、座面などは比較的簡単に部品交換頂けます。
ご購入や価格などのお問合せ交換の際にはシリアルナンバーが必ず必要になります。番号を控えて頂き、ご購入時に記載頂くようお願い致します。※下記シールが本体にあり写真箇所に記載がございます。

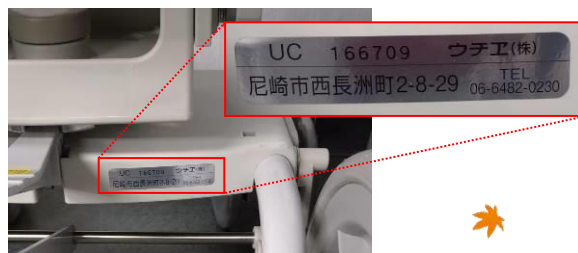

- ◆ウチエ全商品の**デモ機**がございます。お貸出は1週間～10日程でお願いしております。衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！
- ◆次回からはメールにてお送りさせていただきます。よろしければメールアドレスを弊社アドレス (info@uchie.co.jp)、FAXにてお教え下さい。

