

ウチ卫 だより



旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。
本年も一層のサービス向上を目指し、社員一同誠心誠意努める覚悟でございます。
なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。


弊社のシャワーキャリーをいつもご利用いただきましてありがとうございます。
最近では施設へ訪問させていただきますと、海外から働きに来られている方をよく
みるようになりました。シャワーキャリーは高額な商品ですので、少しでも長く
ご利用いただけますよう、納品時にこの注意点を、もう一度入浴介護をされる方
にお伝えください。

それでは、座面や背中部のシートの外し方です！

弊社の座面や背中部のシートの裏側には、凸タイプの突起加工がされています。

座面や背中部のシートを上から引っ張りますと、この凸部が弱くなってしまいます。

もちろん、座面や背中部シートは消耗品ですので部品購入はできますが、うっかり購入初日から商品を傷めてしまうと気分も落ち込みますよね。

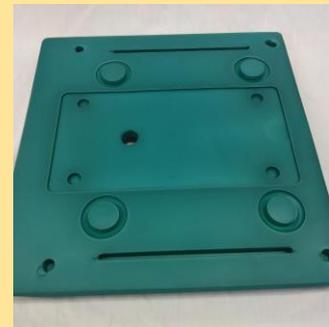

良い例

シート受けの裏側からシート凸部を押し取り外してください。



座シート



背シート

悪い例

シートを上から引っ張って取り外すと、凸部の劣化が早くなり、裂ける恐れがあります。



座シート



背シート

- ◆ウチ卫全商品のデモ機がございます。お貸出は1週間～10日程でお願いしております。ご希望がありましたら順次対応させていただきます。※衛生面から実使用は出来ません。
- ◆次回からはメールにてお送りさせていただきます。よろしければメールアドレスを弊社アドレス (info@uchie.co.jp)、FAXにてお教えてください。

